


Nombre del Producto BOTA BLUNDING PREMIUM

Código MI-150

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Inmovilizador de tobillo diseñado con balancín en la parte inferior del eje y el talón del perfil bajo permiten un patrón más fácil y natural del paso, más talón amortiguado para una mayor absorción de energía al caminar. Cuerpo confeccionado en laminado de velour y en su interior de algodón, anatómico se ciñe en el pie del paciente logrando un mejor ajuste y comodidad.

Indicación Post-operatorio de ligamentos del tobillo.
 Lesiones de tendones.
 Fracturas o luxaciones de la articulación tibiotarsiana.
 Manejo conservador de las lesiones de Metatarso y Tarso.
 Después de una fijación en el tendón peroneo.
 Como tratamiento en las fracturas del Tarso calcáneo y maléolos.
 Terapia funcional de la rotura del tendón de Aquiles.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Largo del Pie	23 cm.	27 cm.	28,5 cm
Nº de Calzado	37 - 38	39 - 42	43 - 44

Medidas	Extra Large
Largo del Pie	31 cm.
Nº de Calzado	45 - 46

Composición Cara Interna: 80% Poliéster / 20% Algodón
 Cara Externa: 100% Poliéster
 Estructura: 100% Nylon
 Suela: 100% Goma termoplástica
 Plantilla: 100% Polipropileno
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Negra

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001010837
Medium	7801001010844
Large	7801001010851
Extra Large	7801001010868

Envasado Bolsa tela no tejida: 44cm alto x 32cm ancho x 14cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave
 Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Certificación y Registros Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.
 Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 Nº CL13/20100668
 Registro FDA Nº 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública Nº EDM 198/14