



Nombre del Producto BOTA DE DESCARGA

Código MI-170

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Bota de descarga para uso en paciente con úlceras plantares

Indicación Permite la curación de úlceras plantares reduciendo la carga e inmovilizando el pie.

1. Remueva la plantilla que se encuentra al interior de la bota de descarga
2. Proceda a marcar el contorno de la úlcera con el lápiz marcador.
3. Coloque el pie del paciente sobre la plantilla para imprimir la localización del la úlcera
4. Remueva la plantilla y retire todos los hexágonos marcados
5. Reinserte la plantilla en el interior de la bota de descarga
6. Coloque el pie del paciente al interior de la bota y proceda a ajustar los velcros.

*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large
Largo del Pie	23 cm.	27 cm.	28.5 cm
Nº de Calzado	38 - 39	39 - 42	43 - 44

Medidas	Extra Large
Largo del Pie	31 cm.
Nº de Calzado	45 - 46

Composición

Estructura: 100% Nylon
 Planta: 100% Polipropileno
 Plantilla: 100% Goma Eva
 Hexágonos removibles: 4 Capas: 3.5 mm. de Goma Eva de alta densidad 30 a 35 gris
 3 mm. de Espuma de poliuretano densidad 45 a 50 negro
 7 mm. Espuma de poliuretano densidad 20 blanco
 Velour con cierre de contacto negro

Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001011018
Medium	7801001011025
Large	7801001011032
Extra Large	7801001011131

Envasado Bolsa tela no tejida: 29cm alto x 16cm ancho x 30cm fondo

Mantenimiento de Producto Lavar la estructura con un paño húmedo y detergente suave
 Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado solo por una persona.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668