



**Nombre del Producto** SOPORTE FRÍO-CALOR PARA ZONA LUMBAR

**Código** PK-54

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Compresa frío-calor lumbar, fabricado en laminado de velour y algodón mas cierre de contacto para ajuste. En su interior lleva compresa frío-calor reutilizable, práctica, fácil y segura de usar.

**Indicación**

#### APLICACIONES EN FRÍO

El tratamiento de frío debe ser usado por 24 a 48 horas después de la lesión. El frío reduce el flujo sanguíneo a una lesión, por lo tanto, reduce el dolor la inflamación y espasmo muscular. La aplicación de frío es buena para: Esguinces, distensiones, golpes y moretones que pueden ocurrir en deportes o actividades de la vida diaria. No se debe aplicar por periodos superiores a 20 minutos.

**Las aplicaciones recomendadas deben ser hechas por un especialista**

#### APLICACIONES EN CALOR

El calor dilata los vasos sanguíneos lo cual incrementa el flujo de sangre y provee oxígeno y nutrientes para reducir el dolor en articulaciones y relaja musculatura, tendones y ligamentos. La aplicación de calor puede mejorar la flexibilidad, reducir espasmos musculares y aliviar el dolor. Aplicar calor en articulaciones rígidas, dolor muscular o dolor articular.

No aplicar calor si hay inflamación (usar frío) posteriormente calor.

No usar calor en problemas circulatorios o diabetes, tampoco en heridas abiertas o puntos.

No se debe aplicar por periodos superiores a 20 minutos.

**Las aplicaciones recomendadas deben ser hechas por un especialista**

\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Única

**Composición**

Cara Interna:	50% Algodón / 50% Poliéster
Cara Externa:	100% Poliéster
Gel:	96% Excipientes / 3% Polisacáridos / 1% Colorante
Cierre de Contacto:	100% Nylon

**Color** Plata

Código de barra	Talla	CÓDIGO
	Única	7801001006687

**Envasado** Caja estuche: 22cm alto x 15.5cm ancho x 6.5cm fondo

**Unidad de Empaque** 6 Unidades

**Mantenición de Producto** Lavar a mano o maquina hasta 30°C de Temperatura  
 Antes de lavar retirar la bolsa de gel  
 Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas

**Vigencia** Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.

Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.

Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
 Registro FDA N° 9104922  
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14