



Nombre del Producto	SOPORTE FRÍO-CALOR PARA CIRUGIA DE RODILLA
Código	PK-56
Origen	Chile
Marca	Blunding
Descripción	Compresa frío-calor para rodilla, fabricado en laminado de velour y algodón mas cierre de contacto para ajuste. En su interior lleva compresa frío-calor reutilizable, práctica, fácil y segura de usar.

APLICACIONES EN FRÍO	
Indicación	El tratamiento de frío debe ser usado por 24 a 48 horas después de la lesión. El frío reduce el flujo sanguíneo a una lesión, por lo tanto, reduce el dolor la inflamación y espasmo muscular. La aplicación de frío es buena para: Esguinces, distensiones, golpes y moretones que pueden ocurrir en deportes o actividades de la vida diaria. No se debe aplicar por periodos superiores a 20 minutos. Las aplicaciones recomendadas deben ser hechas por un especialista

APLICACIONES EN CALOR	
	El calor dilata los vasos sanguíneos lo cual incrementa el flujo de sangre y provee oxígeno y nutrientes para reducir el dolor en articulaciones y relaja musculatura, tendones y ligamentos. La aplicación de calor puede mejorar la flexibilidad, reducir espasmos musculares y aliviar el dolor. Aplicar calor en articulaciones rígidas, dolor muscular o dolor articular. No aplicar calor si hay inflamación (usar frío) posteriormente calor. No usar calor en problemas circulatorios o diabetes, tampoco en heridas abiertas o puntos. No se debe aplicar por periodos superiores a 20 minutos. Las aplicaciones recomendadas deben ser hechas por un especialista *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla	Única
Composición	Cara Interna: 100% Algodón Cara Externa: 100% Poliéster Gel: 96% Excipientes / 3% Polisacáridos / 1% Colorante Cierre de Contacto: 100% Nylon
Color	Plata

Código de barra	Talla	CÓDIGO
	Única	7801001006700

Envasado Caja estuche: 29.5cm alto x 13cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 6 Unidades

Mantención de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30°C de Temperatura
Antes de lavar retirar la bolsa de gel
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14